


MODE D'EMPLOI ET NOTICE D'ENTRETIEN VISIÈRE DE PROTECTION



L'Académie de médecine déconseille le port du masque pour les enfants de moins de 10 ans (risque d'étouffement et d'encombrement des voies respiratoires). La Cali a donc fait le choix de doter tous les enfants de 3 à 10 ans d'une visière de protection aux dimensions adaptées à son visage.

Les visières de protection couvrent entièrement le visage, notamment les muqueuses (yeux, nez et bouche), portes d'entrée du virus Covid-19.

Montage de la visière

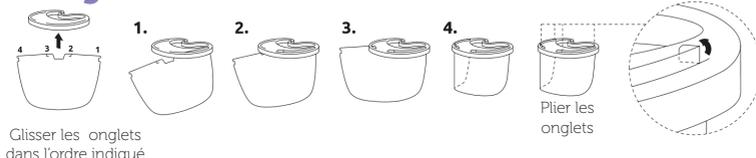

Recommandations d'usage

- La visière est personnelle et individuelle.
- Ne pas toucher le plexi lors de la pose (saisir par le serre-tête)
- Éviter de se toucher le visage sous la visière.
- Le port de la visière est à proscrire sur les temps de récréation, de motricité et d'activités sportives.
- Ne pas exposer la visière trop longtemps à des températures élevées.

Entretien de la visière de protection

- ➊ À l'eau savonneuse, alcool ou solution hydroalcoolique (se laver les mains avant le nettoyage).
- ➋ Laisser sécher dans un endroit aéré et dégagé (ne pas toucher la visière avant toute nouvelle utilisation).
- ➌ Ne pas utiliser de solvants ou de gels.

Désinfection avant et après chaque utilisation (avant et après l'école)

Informations techniques

Convient pour la protection contre les particules et les projections de liquide.
Dimensions: 356 mm x 235 mm - Poids : 65 g PET / PVC transparent de 200 microns d'épaisseur.
Matériau durable (100% recyclable)
Certificat aux normes : DIRECTIVE 2003/89 / CE de novembre 2003 modifiant la directive 2000/13 / CE (Substances allergènes). Le respect de la législation en Europe (Règlement CE n° 1907/2006 Reach) et au niveau international est garanti.